


Användarguide Tork Medicinskt Munskydd Typ IIR

Minskar risken för smittspridning,
från bäraren till andra personer

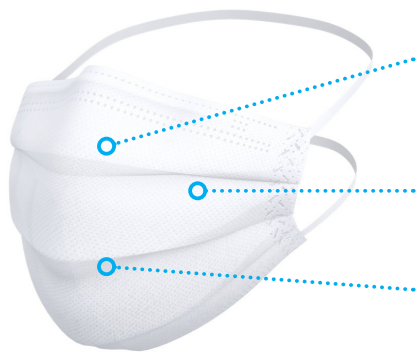

CE-märkt medicinteknisk produkt

Veckad och designad för
god passform och komfort

Kan användas i miljöer där det
finns risk att exponeras för stänk
av vätskor

Filtrerar bakterier
Bakteriefiltreringseffektivitet
≥ 98% enligt EN14683



Så här gör du

Ta på munskyddet

- 1 Rena händer:** Sprita händerna noga (20-30 sek) alt. tvätta händerna (40-60 sek) innan du tar på dig munskyddet
- 2 Förjustera näsklämman:** Hitta munskyddets näsklämma. Förjustera och forma näsklämman på mitten
- 3 Ta på dig munskyddet:** Fånga upp banden, sätt på munskyddet genom att trä banden över huvudet. Näsklämman skall vara uppåt.
 - 3a Övre bandet:** Notera att det övre bandet skall vara placerat högt upp på huvudet och bandet skall gå ovanför öronen.
 - 3b Nedre bandet:** Det nedre bandet skall placeras över nacken.
- 4 Justera näsklämman:** Justera återigen näsklämman.
- 5 Dra ut munskyddet:** Dra ut munskyddet uppåt och neråt så att du är säker på att det täcker näsa och mun väl. Ju mindre veckat munskyddet är, desto färre lager blir det att andas genom.



Ta av munskyddet

- 1 Ta av dig munskyddet:** Ta tag i de elastiska banden bakom huvudet, dra dem över huvudet. Undvik att röra vid munskyddet.
- 2 Kassera munskyddet:** Kassera munskyddet direkt efter användning, håll enbart i banden och håll munskyddet bort ifrån dig.
- 3 Rena händer:** Sprita händerna noga (20-30 sek) alt. tvätta händerna (40-60 sek) efter att du tagit av dig munskyddet.



www.tork.se
031-746 17 00
information.tork@essity.com